

保守点検・修理 報告書

発行日: 2020年 1月 16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300585
作業年月日	2020年 1月 16日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	三枝クリニック・肛門科 様		TEL: 053-436-2108
所在地	静岡県静岡市葵区栄町1-1		ご担当 様
販売店	ベルメディカルケア株式会社		ご担当 望月 様
納入年月日	平成 27年 7月 10日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 4回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E=200×15、E=110×7、E=207×6、E=300×4、E=202×7
E=202×8

不具合原因、作業内容

R2年度、保守点検を実施いたしました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 4/9
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 交換
	☐		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 2071	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒: 8638	殺菌/消毒+7L: 1640
	リークチェック: 10	自己洗浄: 61	アルコール単独: 3	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	オゾン水濃度計		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R2年 1月 16日

ご署名 三枝クリニック 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL: 052-859-1333

責任技術者	作業者
	藤田