

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 1 年 7 月 31 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100271
作業年月日	令和 1 年 7 月 31 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	せんだファミリークリニック 様	TEL： 052-723-1200
所在地	愛知県名古屋市千種区北千種2-5-30	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 24年 2月 3日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 7 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

水温異常 E-206

9:26 ~ 9:44

不具合原因、作業内容

水温正常、良好。セタ-感知不良の可能性がある。
→ 交換実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 393
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒ 27°C 1800	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

交換後動作点検実施、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 49	更新（リット）実施・未実施	殺菌/消毒： 61	殺菌/消毒+アル： 1880
	リークチェック： 21	自己洗浄： 222	アルコール単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ：水槽側		☐	
ポン水濃度計		☐		接続コネクタ：チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☐		オゾン水濃度計		☒	1
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 福田 洋美 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

福田

福田

Ver.3.1