

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2019 年 9 月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100839
作業年月日	2019 年 9 月 30日		作業時間： Hr
顧客名	白鳥病院 様		TEL： 0515-82-3131
所在地	岐阜県郡上市白鳥町為真1205-1		ご担当 様
販売店	井上精機株式会社 高山営業所		ご担当 松本 様
納入年月日	平成 25年 7月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 6 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E205X1 E215X1 E300X1 E101X1 E202X2			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 492
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
トレイに水びかり、オゾンセンサー、大気センサーのケーブル、2本と破損 (現状で70%)、次回・中澤にお預かりして修理。次回で2本1本交換			

装置 情報	交換後運転回数： 802	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 1138	殺菌/消毒+7L： 3493
	リークチェック： 1540	自己洗浄： 348	7L単独： 10	エア単独： 5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒	✓	☒	1	吸盤		☒	3
排水栓	✓	☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
ポン水濃度計	✓	☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ	✓	☒	1			☐	
オゾンセンサー	✓	☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	1 年 9 月 30 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	原 知美
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL： 052-859-1333

責任技術者	作業者
	杉浦