

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成31年3月6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300791
作業年月日	平成 31 年 3 月 6 日		作業時間： 1.0 Hr
顧客名	しみずファミリークリニック 様		TEL： 0586-47-7200
所在地	愛知県一宮市大和町馬引字郷丑寅2136-2		ご担当 様
販売店	中北薬品株式会社 京町支店		ご担当 小森 様
納入年月日	平成 28年 3月 31日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

排水ホース内カビ発生

不具合原因、作業内容

H31年度 定期メンテナンス実施、排水ホース交換
(1年毎の交換)

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒ 302	エアライン	正常	☒ 34.35
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 570
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒ → 交換
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後、特に問題なし

装置 情報	交換後運転回数： 410	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 392	殺菌/消毒+7L： 837
	リークチェック： 0	自己洗浄： 802	アルコール単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

31 年 3 月 6 日

ご署名

決脚

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

福田

H30.3/6

福田

Ver.3.1