

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成31年3月29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300963
作業年月日	平成 31 年 3 月 29 日	作業時間： 1.0 Hr
顧客名	北村病院 様	TEL： 052-823-3636
所在地	愛知県名古屋市中区菊住2丁目4-12	ご担当 様
販売店	有限会社ますだ医療商会	ご担当 熊澤 様
納入年月日	平成 28年 9月 20日	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

アアルコール補充表示が消える 3/28時点

不具合原因、作業内容

3/29 特注内題の点検、吸盤、コントロール基盤交換と内部清掃

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 358
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 269 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後 特注内題の点検（無償対応）

装置情報	交換後運転回数： 80	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒： 213	殺菌/消毒+7L： 363
	リークチェック： 353	自己洗浄： 165	アルコール単独： 5	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		コントロール基盤		☒	1
オゾンセンサー		☐		アルコールセンサー		☒	1

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H31年3月29日

花園 和江

ご署名

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市中区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

H31 3/29
花園 和江

Ver.3.1