

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

14-03097

No. 190527

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 名古屋支店 殿	機種	OED-1000
客先	顧客名	安江内科クリニック 様	機番	100282
環営	所在地	愛知県名古屋市天白区大根町 370	納入日	平成 23 年 7 月 22 日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日		平成 31 年 02 月 13 日	
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	令和 元年 05 月 22 日

修理依頼・不具合内容

排水時に異音がする

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検および作業内容

異音は再現しませんでした。排水ポンプの回転軸が摩耗すると大きな音が発生しますのでこれが原因と推測いたします。また排水ポンプの制御に関する部品も交換いたしました。

写真：交換部品一式



[2] 作業内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：装置情報

交換後運転回数：101 殺菌：418、殺菌＋アルコール：1439、リークチェック：5

自己洗浄：719、アルコール単独：4、エア単独：2

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水位レベルセンサー	1 個	
	排水ポンプ	1 台	

承認



審査



作成

R01. 05. 27

中澤

（株）IHI アグリテック（旧社名：IHI シパウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528