

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. R20200820

発行日: 令和 2 年 8 月 20 日

|       |                                                                                                                             |                                                                       |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                       |                                                                       | 製造番号: 301439      |
| 作業年月日 | 令和 2 年 8 月 20 日                                                                                                             |                                                                       | 作業時間: 1 Hr        |
| 顧客名   | 石坂医院 様                                                                                                                      |                                                                       | TEL: 076-477-1818 |
| 所在地   | 富山県滑川市大窪737                                                                                                                 |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 富山県医師協同組合 様                                                                                                                 |                                                                       | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 平成 30 年 5 月 10 日                                                                                                            | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 2 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>      |                                                                       |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E-100x1

不具合原因、作業内容

2020年 保守点検

点検項目

|          |                                                                               |              |                                        |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | バルブ数 376    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |             |
|          | <input type="checkbox"/>                                                      |              | <input type="checkbox"/>               |             |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |              |                    |            |               |
|----------|--------------|--------------------|------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 209 | 更新 (リセット) (実施) 未実施 | 殺菌/消毒: 95  | 殺菌/消毒+7L: 283 |
|          | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 0            | アルコール単独: 1 | エア単独: 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: 水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店  
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40  
TEL: 052-859-1333

責任技術者

作業者

12/20

2020/8/20