

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 2 年 7 月 2 / 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100661
作業年月日	令和 2 年 7 月 2 / 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	庄南内科 様	TEL： 052-769-1230
所在地	愛知県尾張旭市庄南4-112-1	ご担当 様
販売店	株式会社スズケン 名古屋支店	ご担当 様
納入年月日	平成 25年 1月 10日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 6 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

水位センサー異常

不具合原因、作業内容

定期メンテナンス実施、22ホール基盤 + 22ホール交換 (¥140,000-)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 427
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後、特に問題はなし

装置情報	交換後運転回数： 277	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 18	殺菌/消毒+7L： 1527
	リークチェック： 0	自己洗浄： 380	7Lアルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☐	
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	22ホール基盤		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	2271821	63-	☒	1

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

尾形 寛幸

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

福田

福田

Ver.3.1