

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

2021年12月21日

お客様	名称	様	製造番号	点検実施日	ご承認印
	住所		100389	2021 12/21	
	納入場所		1238	点検実施者 EMシーサーセス(株) 河野	
			サービス形態	モリタ担当者	

ドア機能

- ドア開閉動作
- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ドア締め付けスイッチの作動
- インターロックの作動
- テンションスプリングの取付け・伸び
- ドアパネルの取付け・キズ
- ドアヒンジの動作
- ドア手動開放レバーの作動
- ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ローラーポンプの作動
- 薬剤投入量
- 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取付け
- 乾燥ファンの作動・異音
- 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- 乾燥ヒータの作動
- プレフィルタのつまり・汚れ
- HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
- 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
- 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- 給水弁の作動・漏れ
- 給湯弁の作動・漏れ
- 水位圧カススイッチの取付け・漏れ
- 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- 循環ポンプの取り付け・漏れ
- 循環ポンプの作動・異音
- 防振ゴムの取り付け・劣化
- 排水ポンプの取り付け・漏れ
- 排水ポンプの作動・異音
- 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- 槽内LEDの点灯
- 洗浄アームの回転
- 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- 加温ヒータの汚れ・損傷・変形
- ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示
- 電源スイッチの作動
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み
- 端子の緩み・コネクターの接続
- メモリーカードへの書き込み確認
- 圧力センサーの取付け
- ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- 外装の汚れ・損傷
- 制御パネルカバーの汚れ・損傷

性能評価

- インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
◎	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン(上部 下部)	1
薬剤ホース(ポンプチューブ)	2
プレフィルタ - HEPAフィルタ - セット	1
ラック接続ゴムブッシュ	1
排水口フィルタ	1

株式会社IHI物流産業システム  
 環境ソリューションBU サービスグループ  
 〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
 TEL: 086-944-6528  
 FAX: 086-942-9030

# << 客先対応報告書 >>

【発生日】 2021年12月21日 【対応日】 2021年12月21日  
【連絡元】 モリタ(担当者: ) ディーラー(担当者: )  
ユーザー その他( IHI )  
【所在地&ユーザー名】 さと歯科医院 静岡県浜松市中区中島3丁目1-19.

案件No. \_\_\_\_\_  
電話受付: \_\_\_\_\_  
現地対応: \_\_\_\_\_  
送り状番号: \_\_\_\_\_

【機種】 IC Washer · IC Clave · WD-150 · BC-17  
(機番: 100389.)

【症状・エラーコード】  
定期メンテナンス依頼

【対応方法】  
 預かり修理 (代替機No. )  
 現地対応  
対応内容:  部品交換( )  
 その他 ( )

【運転情報】  
運転回数: (1238) 回 ※前回メンテからの運転回数  
保守点検:  有  無  販売店確認  
修理方法:  有償  無償  販売店確認  
備考: ( )  
※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】  
<ICW・WD>  水  水&温水  
<ICC・BC>  生成器 (アイオニー・ )  
 精製水購入  
【ラック・バスケット種類】  
<ICW・WD>  標準ラック  ハンドピースラック  
<止水プラグ使用>  有  無  
<SUSフィルター洗浄>  有  無  
【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】  
 単回使用  複数回使用  
【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】  
 有  無

【設置場所】  
 作業台上  シンク下  
 その他( )  
【現地対応者コメント・所感】  
二段目ラック. 缶内レールのローラー外れ.  
(補修,)