

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2020 年 8 月 7 日

|       |                                                                                                                             |                                                                       |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus                                                                                                 |                                                                       | 製造番号： 500356      |
| 作業年月日 | 2020 年 8 月 7 日                                                                                                              |                                                                       | 作業時間： 1.5 Hr      |
| 顧客名   | みやはら内科クリニック 様                                                                                                               |                                                                       | TEL： 054-647-5670 |
| 所在地   | 静岡県藤枝市小石川町1-7-20                                                                                                            |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 株式会社スズケン 静岡支店                                                                                                               |                                                                       | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 2019 年 7 月 30 日                                                                                                             | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 / 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>      |                                                                       |                   |

|                           |                                                                               |              |                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                                                               |              |                                                    |
| E202X1 E101X1             |                                                                               |              |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                                                               |              |                                                    |
| 点検項目                      |                                                                               |              |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 水槽 LED       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 793    |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.74 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 消毒 チューブ類     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水槽側コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                           | <input type="checkbox"/>                                                      | 運転プログラムバージョン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> Ver. 1      |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                                                               |              |                                                    |

|          |                   |                                                                              |                   |                |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 520      | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 消毒（総運転回数）： 288    | 消毒（洗剤洗浄あり）： 64 |
|          | 消毒+アル（総運転回数）： 233 |                                                                              | 消毒+アル（洗剤洗浄あり）： 20 | 230            |
|          | リークチェック： 257      | 自己洗浄： 296                                                                    | 7Lノール単独： 0        | エア単独： 1        |

| 交換部品名称  | 交換                       | 数量 | 交換部品名称       | 交換・数量                    | 交換部品名称  | 交換・数量                    |
|---------|--------------------------|----|--------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| オゾン水濃度計 | <input type="checkbox"/> |    | オゾン分解触媒      | <input type="checkbox"/> | 吸盤      | <input type="checkbox"/> |
| 交換後 No. |                          |    | 排水栓          | <input type="checkbox"/> | エアフィルター | <input type="checkbox"/> |
| オゾンセンサー | <input type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ：チューブ側 | <input type="checkbox"/> | 水フィルター  | <input type="checkbox"/> |
|         | <input type="checkbox"/> |    | オゾン水濃度計用フィルタ | <input type="checkbox"/> |         | <input type="checkbox"/> |
|         |                          |    |              | <input type="checkbox"/> |         | <input type="checkbox"/> |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| お客様ご確認署名欄                         | 2 年 8 月 7 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |             |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |             |
| ご署名 平田 里美                         | 印           |

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店  
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40  
TEL：052-859-1333

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 杉浦  |