

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 2 年 10 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300273
作業年月日	令和 2 年 10 月 12 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	藤沢医院 様		TEL： 0562-83-8111
所在地	愛知県知多郡東浦町石浜白山1-100		ご担当 様
販売店	シーアール中部株式会社 様		ご担当 高澤 様
納入年月日	平成 26 年 9 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6 年 6 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
2年度定期メンテナンス実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 676
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数： 90	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 71	殺菌/消毒+7L： 556
	リークチェック： 4	自己洗浄： 4	7Lアルコール単独： 0	エア単独： 67

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水バルブ - 活性炭		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	2020 年 10 月 12 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 中川 東	印

修理業者	新鋭工業 株式会社 名古屋支店 愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40 TEL：052-859-1333	責任技術者	田村	作業者	
------	---	-------	----	-----	--