

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. R 20201030

発行日: 令和 2年 10月 30日

|       |                                                                                                                            |                                                                       |                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                      |                                                                       | 製造番号: 100609      |
| 作業年月日 | 令和 2年 10月 30日                                                                                                              |                                                                       | 作業時間: Hr          |
| 顧客名   | 池田内科医院 様                                                                                                                   |                                                                       | TEL: 076-472-5222 |
| 所在地   | 富山県中新川郡上市町法音寺1                                                                                                             |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 丸文通商株式会社 富山支店 様                                                                                                            |                                                                       | ご担当 川上 様          |
| 納入年月日 | 平成 24年 12月 13日                                                                                                             | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 8年7回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>     |                                                                       |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E-101 x 1 , E-202 x 1

不具合原因、作業内容

点検項目

|          |                                                                               |              |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 368    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺フューズ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                                                      |              | <input type="checkbox"/>                           |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |              |                                                     |            |                |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 228 | 更新(リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 殺菌/消毒: 24  | 殺菌/消毒+7L: 2662 |
|          | リークチェック: 3   | 自己洗浄: 1040                                          | アルコール単独: 2 | エア単独: 0        |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: 水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: フューズ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒930-0353 富山県中新川郡上市町法音寺1番地 日

池田内科医院

院長 池田 正

ご署名 TEL (076) 472-5222 印

FAX (076) 472-5225

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店  
愛知県名古屋市中区石仏町 2-1-40  
TEL: 052-859-1333

責任技術者 25 作業者

2020/10/30