

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20200303

発行日：令和3年 3月 3日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100804
作業年月日	令和 3 年 3 月 3 日	作業時間： / Hr
顧客名	花木内科クリニック 様	TEL：
所在地	三重県鈴鹿市高塚町213-28	ご担当 様
販売店	スズケン四日市	ご担当 様
納入年月日	2013/11/12	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 5 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E-201X2 E-202X4

不具合原因、作業内容

定期XNF

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 627
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

完了、オゾン水39709J/L 10.1% 割木
交換提案

装置情報	交換後運転回数： 175	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒： 507	殺菌/消毒+7L： 1144
	リークチェック： 0	自己洗浄： 235	アルコール単独： 9	エア単独： 6

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

年2021. 3. 月3 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

13-011 鈴鹿市高塚町213-28

花木内科クリニック 印

代表取締役 花本 雅彦

責任技術者

作業者

修理業者

新鋭工業 株式会社 名古屋支店

愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40

TEL：052-859-1333

本田