

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日：令和2年9月15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100744
作業年月日	令和 2 年 9 月 15 日		作業時間： 60 Hr
顧客名	いはら内科外科クリニック 様		TEL： 052-773-0021
所在地	愛知県名古屋市名東区よもぎ台2-616		ご担当 様
販売店	(株)スズケン 名東支店		ご担当 様
納入年月日	平成25年 10月 18日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☒		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

9/2, 9/14 停電でエ=403 (エ=バルブ基盤不良)

不具合原因、作業内容

新型 エ=バルブ基盤 + カラ-2-11, 2-12 交換 (オゾン水 OED-1000 への変更)
(① ¥90,000-) (② ¥50,000-)

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

点検後、特記事項はなし (12月定期点検)

装置情報	交換後運転回数： 69	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 326	殺菌/消毒+7L： 335
	リークチェック： 0	自己洗浄： 155	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		エ=バルブ基盤	OED-1000A	☒	1
オゾンセンサー		☐		カラ-2-11, 2-12		☒	1

お客様ご確認署名欄

内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

署名 山手原直隆 印

2020年 9月 15日

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者