

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 5 月 25 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 0ED-1000S Plus		製造番号:	500557
作業年月日	2020 年 5 月 25 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	あさひ内科小児科クリニック 様		TEL:	0586-51-8080
所在地	愛知県一宮市瀬部小山6-1		ご担当	様
販売店	株式会社三輪器械		ご担当	長谷川 様
納入年月日	2019 年 4 月 11 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

3/7 E:202 4/10 E:302 4/27 E:302 5/22 E:204

不具合原因、作業内容

20年度、定期メンテナンス実施、小物入れ、計量カップ復旧発送

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 494
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver.0303 / T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後、再点検問題なし

装置 情報	交換後運転回数:	986	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒 (総運転回数):	346	消毒 (洗剤洗浄あり):	346
	消毒+アル (総運転回数):	638		消毒+アル (洗剤洗浄あり):	638		
	リークチェック:	508	自己洗浄:	193	アルコール単独:	0	エア単独:

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 3
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; チューブ側	☐ 1	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 5 月 25 日

ご署名 中野 陽介



修理業者

新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL: 052-859-1333

責任技術者

作業者

福田

福田

Ver.4.0