

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 4 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：	301042
作業年月日	令和 3 年 4 月 13 日		作業時間：	/ Hr
顧客名	東脇胃腸科外科 様		TEL：	0532-32-3831
所在地	愛知県豊橋市東脇4-1-6		ご担当	様
販売店	(株)三輪器械 豊橋営業所 様		ご担当	松原 様
納入年月日	平成 29 年 3 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし。

不具合原因、作業内容

R3年度 定期点検実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 542
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後 特に問題なし。

装置 情報	交換後運転回数： 29	更新（別外）実施・未実施	殺菌/消毒： 125	殺菌/消毒+7L： 93
	リークチェック： 2	自己洗浄： 1	7Lアルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	3
ポン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2021 年 4 月 13 日
林 章 新

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市中区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

福田

前田