

修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号	14-06534	No. 21423
--------	----------	-----------

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 名古屋支店 殿	機種	OED-1000S
客先	顧客名	一里山・今井病院 様	機番	300016
環営	所在地	愛知県刈谷市一里山町中本山88	納入日	2013年03月13日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
			受付日	2021年03月10日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2021年04月13日

修理依頼・不具合内容

2020/12/3 10:45 酸素圧力異常2 (E:200)
 ~この間109回 正常に運転できている
 2021/2/12 10:57 酸素圧力異常2 (E:200)



不具合原因 (故障箇所) と処置

[1] 点検結果 (不具合箇所と不具合原因)

条件 (連続・間欠、酸素圧力) を振って運転しましたが、異常は再現しませんでした。
 分解点検したところ、コントロールの信号回路が不安定なので
 これを交換し、定期交換部品を交換いたしました。

写真1 : 定期交換部品

写真2 : タッチパネル、基板

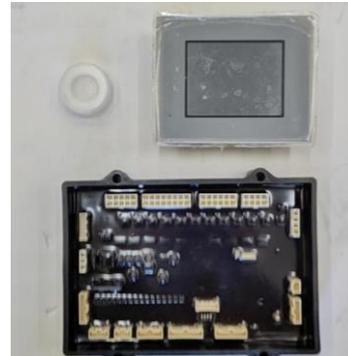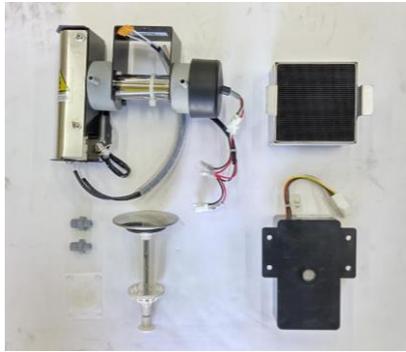

[2] 修理・点検内容

- 1 : 部品交換・・写真と下表をご参照ください
- 2 : オゾン水濃度測定 (規定値 0.7 ± 0.2 ppm) : 0.70 ppm・・正常
- 3 : 出荷時の装置情報
 消毒 : 2017、消毒+アルコール : 1704、リークチェック : 7
 自己洗浄 : 564、アルコール単独 : 8、エア単独 : 31

承認	松永
責任技術者	中澤
作成	中澤
R03. 4. 26	

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品 オゾン水濃度計、オゾン機、フィルタ、触媒、排水栓	1式	濃度計 No. 13111596 バルブ : 505
2、3	タッチパネル、コントロール基板	1台	Ver0209/T05C LED3.3V
4	アルコールタンクキャップ	1個	

(株) IHIアグリテック (旧社名 IHIシバウラ)

岡山市東区西大寺新地170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1