

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S	製造番号 : 300401
作業年月日	平成 27 年 9 月 2 日	作業時間 : Hr
顧客名	山本医院	TEL : 0557-47-5566
所在地	静岡県伊東市宇佐美 1981 番地 12	担当 様
販売店		担当 様
納入年月日	平成 26 年 9 月 26 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検ツール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合、異常なし

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	消毒槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 398
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒チューブ類	正常 ☒
消毒槽コネクタ	正常 ☒	オゾン水 (0.150)	正常 ☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

(GIF 2.140)

チューブ接続コネクタが灰色の部品に変更
使用後は1月の最後に自己洗浄として下さい。

装置 情報	交換後運転回数 : 310	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒 : 0	消毒+7L : 310
	リークチェック : 0	自己洗浄 : ☒	7L単独 : 0	エア単独 : 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27 年 9 月 2 日

ご署名 小松 緑

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL : 03-3816-0444

責任技術者

作業者

