

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 9 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号:	500572
作業年月日	2021 年 9 月 17 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	伊東内科クリニック 様		TEL:	052-751-5588
所在地	愛知県名古屋市千種区山添町1-26		ご担当	様
販売店	(株)三輪器械 本社 内視鏡部		ご担当	吉田 様
納入年月日	2020 年 9 月 11 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E202 x 13 , E209 x 1 , E213 x 1

不具合原因、作業内容

R3年度、定期メンテナンス実施。
初年度のため、無償対応

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 787
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 03041 T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後、特に問題なし。

装置 情報	交換後運転回数: 1017	更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	消毒 (総運転回数): 494	消毒 (洗剤洗浄あり): 3
	消毒+アル (総運転回数):	524	消毒+アル (洗剤洗浄あり):	351
	リークチェック: 1013	自己洗浄: 273	アルコール単独: 5	エア単独: 20

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ側	☐	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☐		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 9 月 17 日

ご署名

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL: 052-859-1333

責任技術者

作業者

前田

Ver.1.0