

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 10 月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号:	500409
作業年月日	2020 年 10 月 16 日		作業時間:	10 Hr
顧客名	瀧消化器内科クリニック 様		TEL:	0586-47-7023
所在地	愛知県一宮市神山1-4-2		ご担当	様
販売店	株式会社三輪器械 本社		ご担当	長谷川 様
納入年月日	2019 年 9 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期メンテナンス実施 (¥78000-) 初年度はサービス

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 365
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 03021 T11A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

動作点検後、特に問題なし

装置 情報	交換後運転回数:	1526 更新 (リセット) 実施 ・ 未実施	消毒 (総運転回数):	553 / 消毒 (洗剤洗浄あり):	553
	消毒+アル (総運転回数):	973	消毒+アル (洗剤洗浄あり):	973	
	リークチェック:	1461	自己洗浄:	275	アルコール単独:
			エア単独:	0	

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☐
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ側	☒ 1	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☒		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 10 月 16 日

ご署名

龍 知 行

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL: 052-859-1333

責任技術者

作業者

福田

福田

Ver. 2.0