

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 7 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>	製造番号： 300141
作業年月日	令和 3 年 7 月 8 日	作業時間： 1.0 Hr
顧客名	三浦医院 様	TEL： 0532-45-2611
所在地	愛知県豊橋市弥生町中原70	ご担当 様
販売店	アルフレッサ株式会社 豊橋支店	ご担当 様
納入年月日	平成 26 年 3 月 7 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 7 回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
 定期メンテナンス実施

点検項目			
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> ハル数 539
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 968 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
 動作点検後、特に問題なし

装置情報	交換後運転回数： 530	更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/>	殺菌/消毒： 105/	殺菌/消毒+7L： 199/
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1118	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	3
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ：水槽側		<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1	接続コネクタ：チューブ側		<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
 豊橋市弥生町字中原70
 医療法人三浦医院
 三浦 正 剛 印
 責任技術者 作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
 愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
 TEL：052-859-1333

福田 福田