

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 2 年 12 月 2 / 日

|       |                                                                                                                        |                                                                       |                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                  |                                                                       | 製造番号： 301325      |
| 作業年月日 | 令和 2 年 12 月 2 / 日                                                                                                      |                                                                       | 作業時間： 1.0 Hr      |
| 顧客名   | 杉本内科クリニック 様                                                                                                            |                                                                       | TEL： 0565-37-3377 |
| 所在地   | 愛知県豊田市日南町5-47-1                                                                                                        |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 株式会社メディセオ 岡崎支店                                                                                                         |                                                                       | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 平成29年12月14日                                                                                                            | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 3 年 3 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>     |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                                       |                   |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期メンテナンス実施

点検項目

|          |    |                                                                 |              |    |                                                  |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|----|--------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 428     |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.1/2 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
|          |    | <input type="checkbox"/>                                        |              |    | <input type="checkbox"/>                         |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後、特に問題はなし

|          |              |                                                                              |            |               |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 212 | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒： 27  | 殺菌/消毒+7L： 530 |
|          | リークチェック： 0   | 自己洗浄： 388                                                                    | 7Lコール単独： 0 | エア単独： 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

〒471-0032 豊田市日南町5丁目47-1

杉本内科クリニック

院長 杉本 吉行

TEL (0565) 37-3377

FAX (0565) 37-2378

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店  
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40  
TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

Ver.3.1