

保守点検・修理 報告書

管理 No. 2021 1208

発行日: 2021 年 12 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒		製造番号:	50071P
作業年月日	2021 年 12 月 8 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	草川医院 様		TEL:	
所在地	三重県津市大里窪田町 1735-1		ご担当	様
販売店	中辻医科器械(株)		ご担当	様
納入年月日	### 年 9 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

定期メンテナンス

点検項目

フタロック	正常	☒	消毒槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	消毒チューブ類	正常	☒
消毒槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐		正常	☐

バルブ数 1223

履歴 0.71 ppm

清掃 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

完了、異常なし

装置
情報

交換後運転回数: 105 更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	消毒 (洗剤洗浄なし): 42	消毒 (洗剤洗浄あり): 8
消毒+アル (洗剤洗浄なし): 6	消毒+アル (洗剤洗浄あり): 142	
リークチェック: 14	自己洗浄: 133	アルコール単独: 0
		エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	水フィルター		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; 消毒槽側		☒	2
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	エアフィルター		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名



修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者	作業者
	本田