

保守点検・修理 報告書

管理 No. 22
発行日: 2021 年 12 月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号:	500602
作業年月日	2021 年 12 月 22 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	西山団地内科胃腸科 様		TEL:	052-701-1121
所在地	愛知県名古屋市中東区西里町1丁目36		ご担当	様
販売店	株式会社メディセオ 名古屋東		ご担当	子安 様
納入年月日	2020 年 11 月 6 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E207 x 3, E110 x 4, E401 x 13, E111 x 16, E202 x 15, E205 x 6
E401 x 13, E215 x 1

不具合原因、作業内容

令和3年度、定期メンテナンス実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 490
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後、特に問題なし。

装置 情報	交換後運転回数: 2039 更新 (1セット) 実施・未実施	消毒(総運転回数): 1366 / 消毒(洗剤洗浄あり): 23	
	消毒+アル(総運転回数): 673	/ 消毒+アル(洗剤洗浄あり): 661	
	リークチェック: 2	自己洗浄: 227	アルコール単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ側	☐	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 12 月 22 日

ご署名 10井 由美子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市中東区石仏町 2-1-40
TEL: 052-859-1333

責任技術者 作業者

前田 前田