

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

14-05920

No. 21423

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 名古屋支店 殿			機種	OED-1000S
客先	顧客名	井上病院 様			機番	300004
環営	所在地	愛知県瀬戸市川北町2丁目11番地			納入日	2013年03月07日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	2020年11月02日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	2021年04月13日
計	3					

修理依頼・不具合内容

履歴不良（オゾン水濃度と患者IDのデータが5か所欠落している）

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

タッチパネルが運転中に再起動する現象を確認しました。これが発生するとコントロール基板との通信が途絶えてデータが欠落します。なお消毒工程は基板側で制御をするため「オゾン水生成異常」などの異常が出ない限り正常に行われております。関連する部品を全て交換し、保守点検を実施しました。

写真1：定期交換部品

写真2：タッチパネル、基板



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70 ppm・・・正常
- 出荷時の装置情報
消毒：2904、消毒＋アルコール：5339、リークチェック：7981
自己洗浄：1396、アルコール単独：153、エア単独：1

承認

松
21.04.26
永

責任技術者

中
21.04.26
澤

作成

R03. 4. 26

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	定期交換部品 オゾン水濃度計、オゾンセンサ、フィルタ、触媒、排水栓	1式	濃度計 No. 51912379 バルブ：740
2	タッチパネル	1台	
3	コントロール基板（Ver0209/T05C LED3.3V）	1台	

（株）IHIアグリテック（旧社名 IHIシバウラ）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1