

修理報告書 (引取り修理)

| | | |
|--------|----------|------------|
| 修理依頼番号 | 14-06019 | No. 210316 |
|--------|----------|------------|

| | | | | |
|-----|-----|---------------------|------|-------------|
| 配布先 | 納入先 | 新鋭工業株式会社 名古屋支店 殿 | 機種 | OED-1000S |
| 客先 | 顧客名 | 井上医院様 | 機番 | 300978 |
| 環営 | 所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤4丁目5-19 | 納入日 | 2016年09月21日 |
| 環品 | 点検者 | 中澤一裕 | 作業時間 | |
| | | | 受付日 | 2020年12月07日 |
| 計 | 返送先 | 納入先と同じ | 出荷日 | 2021年03月05日 |

修理依頼・不具合内容

12/05 停電異常(E:403)・・・10:46、11:01の2回発生
 12/06 消毒時給水異常(E202)・3回発生
 12/07 停電異常(E:403)

不具合原因(故障箇所)と処置

[1] 点検結果(不具合箇所と不具合原因)

分解点検したところコントロール基板とタッチパネルが故障していました。
 この部品を交換して復旧し、保守点検を実施しました。
 給水異常について、給水システムを点検しましたが、異常ありませんでした。

写真1: 定期交換部品

写真2: コントロール基板、タッチパネル、キャップ



[2] 修理・点検内容

- 部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- オゾン水濃度測定(規定値 0.7 ± 0.2 ppm) : 0.71 ppm・・・正常
- 出荷時の装置情報
 交換後運転回数 146→0 殺菌 : 3、殺菌+アルコール : 217、リキチック : 0
 自己洗浄 : 205、アルコール単独 : 0、エア単独 : 0

| | |
|----------|----|
| 承認 | 松永 |
| 責任技術者 | 中澤 |
| 作成 | 中澤 |
| R03.3.16 | |

| 交換部品 | | | |
|------|------------------------------------|----|-----------------------------|
| 部品番号 | 部品名称 | 数量 | 備考 |
| 1 | タッチパネル、コントロール基板 | 1式 | |
| 2 | アルコールタンクキャップ | 1個 | |
| 3 | 定期交換部品 濃度計、センサ、触媒、フィルタ、排水栓、コネクタ | 1式 | 濃度計 : 12020912 パルス : 590 |