

修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号	14-06071	No. 210316
--------	----------	------------

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 名古屋支店 殿	機種	OED-1000
客先	顧客名	こばやしファミリークリニック 様	機番	100552
環営	所在地	愛知県名古屋市緑区桃山2-5-2	納入日	2012年08月07日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	
			受付日	2020年12月28日
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	2021年02月20日

修理依頼・不具合内容

電源不良、タッチパネル故障

不具合原因 (故障箇所) と処置


[1] 点検結果 (不具合箇所と不具合原因)

通電しましたが、基板とタッチパネルが故障してボタンが全く効かない状態でした。
この部品を交換して復旧し、保守点検を実施しました。

写真1：定期交換部品

写真2：コントロール基板、キャップ

写真3：タッチパネル

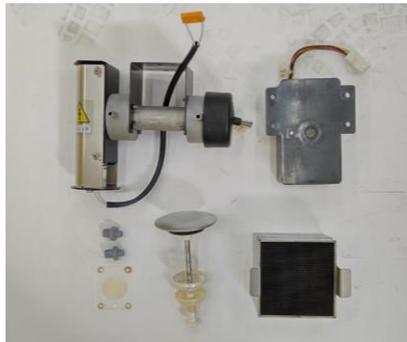

[2] 修理・点検内容

- 1：部品交換・・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定 (規定値 0.7 ± 0.2 ppm) : 0.73 ppm・・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数 536→0 殺菌：135、殺菌+アルコール：1849、リ-クェック：1976
自己洗浄：3、アルコール単独：0、エア単独：0

承認	松永
責任技術者	中澤
作成	
R03.3.16	中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	タッチパネル、コントロール基板	1式	
2	アルコールタンクキャップ	1個	
3	定期交換部品 濃度計、センサ、触媒、フィルタ、排水栓、コネクタ	1式	濃度計：17112941 パルス：894

(株) IHIアグリテック (旧社名 IHIシハラ)

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1