

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

14-06165

No. 210512

配布先	納入先	新鋭工業 株式会社 名古屋支店 殿			機種	OED-1000S
客先	顧客名	光生会病院 様			機番	100660
環営	所在地	愛知県豊橋市吾妻町137番地			納入日	2013年04月03日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	2021年02月09日
	返送先	納入先と同じ			出荷日	2019年04月23日
計	3					

修理依頼・不具合内容

水漏れ（水槽下部）

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果

水槽下部に亀裂が発生しており、ここから水が漏れることを確認しました。
水槽内側から外側にかけて「大きな外力」または「衝撃」がかかったものと思われる。水槽全体を交換して復旧いたしました。

亀裂



[2] 作業内容

- 1: オーバーホール、清掃
- 2: オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）: 0.70 ppm・正常
- 3: 運転確認・正常
- 4: 出荷時の運転情報・交換後運転回数: 690 殺菌: 7064 殺菌+アルコール: 5502
リークチェック: 12415 自己洗浄: 2140 アル単独: 1096 イ7単独: 2

承認	交換部品			
松 20.12.15 永	部品番号	部品名称	数量	備考
	1	水槽	1式	写真1
審査	2	ドレンバルブASSY	1式	写真2
中 21.05.12 澤	3	配管パッキン、チューブ	1式	写真3
	4~5	メインポンプ、コントロール基板	1式	写真4、5
	6~8	直流電源、排水ポンプ、エアポンプ	1式	写真4、5
作成	09~11	排気ファン、マニホールド電磁弁、ブロック	1式	写真4、5
R03.5.12 中澤	12~14	酸素、給水、アルコール電磁弁	1式	写真5
	15	オゾン発生装置	1式	写真4

（株）IHIアグリテック（旧社名：IHIシパウラ）

岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528

写真1：水槽



写真2：ドレンバルブASSY、パッキン



写真3：チューブ

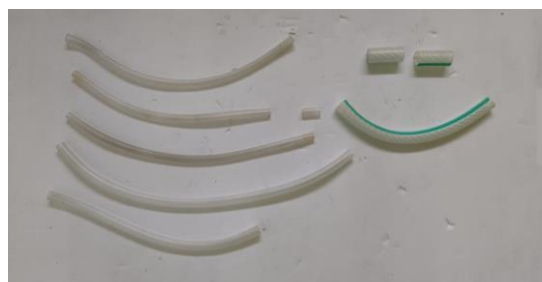


写真4：メインポンプ、エアポンプ、排水ポンプ、オゾン発生機、排気ファン



写真5：コントロール基板、直流電源、マニホールド電磁弁、マニホールドブロック
酸素電磁弁、給水電磁弁、アルコールライン電磁弁

