

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 7 月 1 日

|       |                                                                                                                             |                                                                       |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus <input checked="" type="checkbox"/>                                                             |                                                                       | 製造番号: 500583      |
| 作業年月日 | 2021 年 7 月 2 日                                                                                                              |                                                                       | 作業時間:   Hr        |
| 顧客名   | あおいスクエア 様                                                                                                                   |                                                                       | TEL: 055-991-2038 |
| 所在地   | 静岡県静岡市三島市一番町18-22 アーサーファーストビル1F                                                                                             |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 協和医科器械株式会社 沼津支店                                                                                                             |                                                                       | ご担当 杉山 様          |
| 納入年月日 | 2020 年 10 月 19 日                                                                                                            | 保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 1 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>      |                                                                       |                   |

|                           |                                                                               |              |                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                                                               |              |                                                    |
| E202X3                    |                                                                               |              |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                                                               |              |                                                    |
| 点検項目                      |                                                                               |              |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 消毒槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 997    |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.73 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 消毒チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 消毒槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                           |                                                                               |              | 正常 <input type="checkbox"/>                        |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                                                               |              |                                                    |

|          |                                                                                             |                     |                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 1581 更新 (リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 消毒 (洗剤洗浄なし): 895    | 消毒 (洗剤洗浄あり): 0 |
|          | 消毒+アル (洗剤洗浄なし): 687                                                                         | 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 685 |                |
|          | リークチェック: 678                                                                                | 自己洗浄: 167           | アルコール単独: 2     |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 水フィルター       |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ; 消毒槽側 |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | エアフィルター      |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| お客様ご確認署名欄                         | 年 月 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |       |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |       |
| ご署名 二宮 隆一 印                       |       |

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シパウラ)  
 岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6  
 TEL: 086-944-6528

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
| 杉浦    |     |