

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

14-06783

No. 211005

配 布 先		納 入 先	新鋭工業株式会社 名古屋支店 殿			機 種	O E D - 1 0 0 0 S
客先	1	顧 客 名	井上病院 様			機 番	3 0 0 0 0 4
環営	1						
環品	1						
		所 在 地	愛知県瀬戸市川北町 2 丁目 1 1 番地			納 入 日	2013 年 03 月 07 日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	2021 年 08 月 06 日
計	3	返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	2021 年 09 月 16 日

修理依頼・不具合内容

電源が入らない。

※2021年4月に工場から返却以降、228回運転した後に発生した。

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

分解点検したところ、直流電源のコンデンサが故障していました。
電源に異物や水がかかった形跡は無く、部品の単発故障と推察いたします。
この部品を交換して復旧いたしました。

写真：直流電源



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換・・写真と下表をご参照ください
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.69 ppm・・正常
- 3：出荷時の装置情報

交換後運転回数：228 消毒：2954、消毒＋アルコール：5517、リークチェック：8208

自己洗浄：1452、アルコール単独：159、エア単独：1

承認
松 21.10.05 永
責任技術者
中 21.10.05 澤
作成
R03.10.5 中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
1	直流電源	1台	