

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 9 月 30 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号:	500408
作業年月日	2020 年 9 月 30 日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	青山クリニック 様		TEL:	0562-56-3000
所在地	愛知県刈谷市東刈谷町3-17-12		ご担当	様
販売店	株式会社三輪器械 名古屋東営業所		ご担当	岡田 様
納入年月日	2019 年 9 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分 出張・引取	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 1 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒	
	修理 ☐	点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

初年度定期メンテナンス実施 (¥78,000-)
サージ

点検項目

フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 296
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☐ Ver. 0302/T11A

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

動作点検後、特に問題なし

装置 情報	交換後運転回数:	21	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数):	2	/ 消毒 (洗剤洗浄あり):	2
	消毒+アル (総運転回数):	20		/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり):	20		
	リークチェック:	0	自己洗浄:	20	アルコール単独:	0	エア単独:

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒ 1
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ側	☒ 1	水フィルター	☐
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 9 月 30 日

ご署名 青山 美里 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL: 052-859-1333

責任技術者

作業者

福田

福田

Ver.1.0