

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 10 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒		製造番号: 500396
作業年月日	2021 年 10 月 14 日		作業時間: Hr
顧客名	萩野クリニック 様		TEL: 0559-66-7111
所在地	静岡県沼津市根古屋307-1		ご担当 様
販売店	協和医科器械株式会社 沼津支店		ご担当 山田 (一) 様
納入年月日	2019 年 9 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E111X1 E401 E302X1

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	消毒槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☐	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 835
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	消毒チューブ類	正常	☒
消毒槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐		正常	☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置
情報

交換後運転回数: 111	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒 (洗剤洗浄なし): 3	消毒 (洗剤洗浄あり): 2
消毒+アル (洗剤洗浄なし): 249	消毒+アル (洗剤洗浄あり): 249		
リークチェック: 0	自己洗浄: 59	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	水フィルター		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; 消毒槽側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	エアフィルター		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 萩野 印

修理業者 株式会社 IHI アグリテック (旧社名 IHI シバウラ)
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者 作業者

杉浦