

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 1 月 7 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100127
作業年月日	令和 3 年 1 月 7 日	作業時間： 1.0 Hr
顧客名	なかおたいクリニック 様	TEL： 052-509-2876
所在地	愛知県名古屋市中区小田井5-188	ご担当 様
販売店	株式会社スズケン 中村支店	ご担当 様
納入年月日	平成22年7月13日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 7 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

停電異常 多数あり、8件

不具合原因、作業内容

定期メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 425
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

オゾン水の経年劣化
を換水

動力電源使用、特記事項は

装置 情報	交換後運転回数： 99	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 37	殺菌/消毒+7L： 1035
	リークチェック： 1P	自己洗浄： 568	アルコール単独： 0	エア単独： 259

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☐	
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

3 年 1 月 7 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

福田

Ver.3.1