

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 10 月 22 日

|       |                                                                                                                               |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                                    | 製造番号： 300956      |
| 作業年月日 | 令和 3 年 10 月 22 日                                                                                                              | 作業時間： 1.0 Hr      |
| 顧客名   | 小林内科 様                                                                                                                        | TEL： 052-915-5571 |
| 所在地   | 愛知県名古屋市中区黒川本通3-67                                                                                                             | ご担当 様             |
| 販売店   | アルフレッサ株式会社 様                                                                                                                  | ご担当 高木 様          |
| 納入年月日 | 平成 28 年 8 月 26 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 5 年 5 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>        |                   |

|                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                                  | なし                                                        |
| 不具合原因、作業内容                                                                       | 令和3年度、定期メンテナンス実施。                                         |
| 点検項目                                                                             |                                                           |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                  | オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 470 |
| オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | 排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| 給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                    | オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm  |
| 水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                     | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレイ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                       | 殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/>            |
| 殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                   | マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>       |
|                                                                                  |                                                           |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                                                        | 点検動作後、特に問題なし。                                             |

|      |                               |            |                |
|------|-------------------------------|------------|----------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数： 260 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌/消毒： 8   | 殺菌/消毒+アル： 1585 |
|      | リークチェック： 1598 自己洗浄： 1048      | アルコール単独： 8 | エア単独： 2        |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 1-7422742-7  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 10 月 22 日

ご署名

小林 邦生

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 名古屋支店  
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40  
TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

前田

前田