

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 11 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号: 500297
作業年月日	2021 年 11 月 8 日		作業時間: 1.0 Hr
顧客名	柳澤クリニック 様		TEL: 0562-56-3000
所在地	愛知県知多市にしの台一丁目2606番地		ご担当 様
販売店	株式会社三輪器械 本社 内視鏡部		ご担当 奥谷 様
納入年月日	2019 年 7 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

E111 x1, E40(x1), E20(x1)

不具合原因、作業内容

令和3年度 定期メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 800
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0304 / T12A

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後、特に問題なし

装置 情報	交換後運転回数: 254 更新 (リセット) 実施・未実施	消毒(総運転回数): 8 / 消毒(洗剤洗浄あり): 6
	消毒+アル(総運転回数): 444	/ 消毒+アル(洗剤洗浄あり): 433
	リークチェック: 447	自己洗浄: 441 / アルコール単独: 0 / エア単独: 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☐
交換後 No.			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒ 1
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ: チューブ側	☒ 2	水フィルター	☒ 1
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

3 年 11 月 8 日

ご署名 兼松 豊 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL: 052-859-1333

責任技術者 作業者

福田 前田