

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日：令和4年 1 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100127
作業年月日	令和 4 年 1 月 18 日		作業時間： 1.0 Hr
顧客名	なかおたいクリニック 様		TEL： 052-509-2876
所在地	愛知県名古屋市西区中小田井5-188		ご担当 様
販売店	株式会社スズケン 中村支店 様		ご担当 様
納入年月日	平成 22 年 7 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 8 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
E403 X4	
不具合原因、作業内容	
令和4年度、定期メンテナンス実施。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 615
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
動作点検後、特に問題なし。	

装置 情報	交換後運転回数： 92	更新（ ☒ ）実施・未実施	殺菌/消毒： 38	殺菌/消毒+7L： 1126
	リークチェック： 14	自己洗浄： 612	7Lアルコール単独： 0	エア単独： 355

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	24 年 1 月 18 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 前田 印	

修理業者	新鋭工業 株式会社 名古屋支店 愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40 TEL：052-859-1333	責任技術者	前田	作業者	前田
------	---	-------	----	-----	----