

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日：令和3年 / 月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：	301141
作業年月日	令和 4 年 1 月 27 日		作業時間：	1.0 Hr
顧客名	おわり瀬戸ひびのクリニック 様		TEL：	0561-82-0222
所在地	愛知県瀬戸市西本町2-8		ご担当	様
販売店	株式会社サンメディック 様		ご担当	様
納入年月日	平成 29 年 8 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E200 x 10 , E202 x 4 , E110 x 2.			
不具合原因、作業内容			
令和4年度 定期メンテナンス実施.			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 711
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
動作点検後、特に問題なし			

装置 情報	交換後運転回数： 1670	更新（ ☒ ）実施・未実施	殺菌/消毒： 3076	殺菌/消毒+7L： 2768
	リークチェック： 5237	自己洗浄： 885	7Lアルコール単独： 154	エア単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☐	
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	鉗子コネクタ		☒	2
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	飯島 永子 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 名古屋支店	責任技術者	作業者
	愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40	前田	前田
	TEL：052-859-1333		