

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 4 年 2 月 7 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：	300693
作業年月日	令和 4 年 2 月 7 日		作業時間：	1.0 Hr
顧客名	緑ヶ丘医院 様		TEL：	0532-63-8586
所在地	愛知県豊橋市忠興2-14-5		ご担当	様
販売店	アルフレッサ株式会社 岡崎支店 様		ご担当	様
納入年月日	2015 年 12 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

令和4年度 定期メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 802
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☐ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺フューズ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

正常 動作点検後、特に問題なし

装置 情報	交換後運転回数： 652		更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 99	殺菌/消毒+7L： 1039
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1005		7L単独： 2	エア単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：フューズ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	金網コネクタ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R4 年 2 月 7 日

ご署名

47 内

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市昭和区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者

作業者

前田

前田