

株式会社IHINパウラ 環サ 安田M、品証 塚本S

岡山 FAX(086) 942-9030


IC Clave IC Washer 不具合報告書

支店名	モリタ名古屋	担当者名	田畑様
ユーザー名	ハルイロ歯科クリニック	お客様担当者	院長
納品年月日	2015/11/5	機種名/機番	ICW/100020
発生年月日	2015/11/5	発生場所	岐阜市西中島1-3-1

不具合内容

●内容

製品試運転時に、装置右下部より水漏れ発生。(水量は数分で雑巾2枚が完全に濡れる程度。)
 『IC Washerドアパッキン取り付け方法』資料に基づいて上部パッキンを付け直したが、
 その後、装置左下部より数滴水漏れ。
 技術に問い合わせたところ、「下部両サイドに付いている台形？の小さいパッキン」は不要
 とのことで取り外し、再度上部パッキンを調整。
 ー↑水道水↑ー ー↓温水↓ー
 水道水での運転では水漏れが止まったため温水に切り替えて運転したところ再度水漏れ。
 再度、『IC Washerドアパッキン取り付け方法』資料に基づいて上部パッキンを付け直したが、
 水漏れが止まらなかったため、運転を停止。
 ※この時、ドアを開けて水漏れの跡を確認したところ、ドアガラス面上部に水が溜まっていたため、
ドアの上部から漏れた水がパッキンを伝って横に垂れてきたのではないかと仮説。

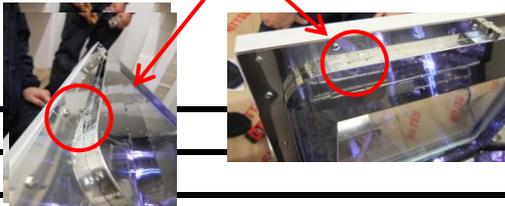

回答

【記入欄】

ドアロック調整不良

上部からの水漏れという点から、ロック部が手前にきていることが考えられる。

考えられる要因としては、

①岡山検査時には水漏れが無いことを確認しているが、その後の郵送や設置環境の違いで、パッキンが歪み、水漏れにつながったのでは。

②ロック部の増し締めが不十分であったことも考えられ、輸送などで、ドアロックの位置が手前に徐々にずれたのではないかと。

設置時は、1次的な対応しか取れなかったとのことで、
 後日、主要原因の対応を予定(※17日対応予定。)

修正方法は、ロック部の調整、パッキンの後ろにスペーサー追加
 (現地条件により対応方法は異なる)

日 15/11/09 高	菊 15/11/09 池	環境 15/11/09 西村
--------------------	--------------------	----------------------