

小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検表

お客様 お名様	名称	製造番号	点検実施日	ご承認印
	住所	運転時間	点検実施者	
	納入場所	サービス形態	モリタ担当部署	

名称: おおのま歯科クリニック
 住所: 山梨県高山市相生町2丁目
 製造番号: 19060106
 運転時間: 1132回
 点検実施日: 2016年6月29日
 点検実施者: エムシーサービス(株)高津
 サービス形態: 定期検診・フルメンテ
 モリタ担当部署:

ドア機能

- 開閉動作確認
- ドアバッキン目視点検
- ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ドア締め付けスイッチ作動確認
- インターロック動作確認
- テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ドアパネルの取付け状態・キズ
- ドアヒンジの動作
- ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ローラーポンプの動作確認
- 流量計の検出状態
- 洗剤投入の確認
- 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取り付け状態
- 乾燥ファンの作動状態・異音
- 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- プレフィルターの汚れ
- メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷・漏れ
- 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 給水弁の作動状態・漏れ
- 給湯弁の作動状態・漏れ
- RO水弁の作動状態・漏れ
- 水位圧カススイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- 乾燥エア回路逆変弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- 循環ポンプの作動状態・異音
- 防護ゴムの取り付け状態・劣化
- 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- 槽内LEDが各工程色で点灯している
- 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電線系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の变色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・变色有無(加温・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ドアバッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- インジケータによる残渣判定(TOSI)

運転確認

✓

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
洗剤ポンプφ42-7	2
配管C	1
ILC	2
ILC用バッキン	2
循環ポンプφ	1


株式会社エムシーサービス

機械事業本部営業部 営業サービス課
 〒704-8122 岡山県岡山市東区河津大寺津 70-6
 TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030