



株式会社IHIC
機械事業本部 営業グループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地10-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

お客様	名称	製造番号	ご確認	五理屋
	日王製材	100154		
	住所 愛知県名古屋市中区栄3-4-21	納入日 2016. 10. 07		
	TOSHINN SAKAE CIV 4F	納入検査実施者 エムシーサービス株式会社 藤下		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	○	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	○	ドアパッキンキズ・汚れ点検		○	アジャスタフットの緩み・設置状態
	○	ドアロックユニット作動確認		○	キズ・汚れ
	○	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		○	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	○	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	○	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	○	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	○	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	○	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		○	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	○	洗剤投入量の確認		○	ラック仕様切換(ハンドピースラック・標準ラック)
	○	ローラーポンプの動作確認		有・無	温水使用切換
給排水	○	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	○	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	○	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		○	周波数と設置ICWの一致
	○	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水/湯逆配管NG)		○	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	○	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		○	運転・お手入れ方法の説明
	○	給湯温度(45~50℃)	その他	○	装置内運転時異音・振動
電装系	○	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果	☒ 良好 ☐ 不良 トシ	
	○	ディスプレイの色あせ・表示確認			
	○	電源スイッチの作動状態			
	○	SDカードの挿入・取外性			
	○	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意)			
	○	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

特記事項