



株式会社エムシーサービス

機械事業本部 営業サービス

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170番1

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030



## クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

|     |    |             |         |                |     |    |
|-----|----|-------------|---------|----------------|-----|----|
| お客様 | 名称 | おちデジタルクリニック | 製造番号    | 100/73         | ご確認 | 春次 |
|     | 住所 | 愛知県長久手市     | 納入検査実施日 | 2016年11月29日    |     |    |
|     |    |             | 納入検査実施者 | エムシーサービス(株) 高津 |     |    |

| 項目      | 判定 | 検査項目                                                        | 項目    | 判定 | 検査項目                                                                                           |
|---------|----|-------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ドア・バツキン | ✓  | ハンドル開閉検出確認                                                  | 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ                                                                              |
|         | ✓  | ドアロックユニット作動確認                                               |       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認                                                                                |
|         | ✓  | ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ                                            |       | ✓  | 電源スイッチの作動状態                                                                                    |
|         | ✓  | ハンドルキズ・汚れ                                                   |       | ✓  | SDカードの挿入・取外性                                                                                   |
| 缶体      | ✓  | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無                                              | 外装・設置 | ✓  | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと                                                                         |
|         | ✓  | 滅菌温度センサの汚れ                                                  |       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ                                                                             |
|         | ✓  | 棚、トレーのキズ・汚れ                                                 |       | ✓  | 本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。                                                                          |
|         | ✓  | 缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性                                         |       | ✓  | アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態                                                                           |
| 給水タンク   | ✓  | 給水タンクの内部汚れ                                                  | 制御    | ✓  | キズ・汚れ                                                                                          |
|         | ✓  | 水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性                                           |       | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷                                                                              |
|         | ✓  | ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか                           |       | ✓  | 運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)                                                                          |
|         | ✓  | 装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)                        |       | ✓  | タッチパネル表示確認・履歴の確認                                                                               |
| 排水タンク   | ✓  | LOW(水切)/High(滴水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致                      | 性能評価  | ✓  | B&Dテスト実施  |
|         | ✓  | タンク内に汚れはないか                                                 |       | ✓  | リークチェックテスト                                                                                     |
|         | ✓  | フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致                                      |       | ✓  | 0点調整                                                                                           |
|         | ✓  | 装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)                        |       | ✓  | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付                                                                            |
| スペース    | ✓  | 設置スペースの確保<br>右90×左50×背面75×天面250mm以上<br>熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと | その他   | ✓  | 運転・お手入れ方法の説明                                                                                   |
|         |    |                                                             |       | ✓  | 装置内運転時異音                                                                                       |
|         |    |                                                             |       |    |                                                                                                |

特記事項