



株式会社エムシーサービス
機械事業本部 営業
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新山 0-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

お客様	名称	水谷歯科医院	製造番号	100226	ご確認	田中
	住所	三重県四日市市小杉町305-1	納入日	2017.6.1		
			納入検査実施者	エムシーサービス(株) 斎藤		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目					
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認					
	✓	ドアパッキンギズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態					
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ					
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと					
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと					
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認					
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認					
	✓	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切替(ハントピースラック・標準ラック)					
	✓	ローラーポンプの動作確認		有/無	温水使用切替					
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価 性能	✓	インジケーターによる残液判定(TOSI)					
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致					
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水/湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付					
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明					
	✓	給湯温度(45~50℃)		✓	装置内運転時異音・振動					
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	その他	✓						
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認		✓						
	✓	電源スイッチの作動状態		✓						
	✓	SDカードの挿入・取外性		✓						
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)		✓						
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ		✓						
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">運転検査結果</td> <td> ☒ 良好 ☐ 不良 </td> <td rowspan="3">トシ</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>						運転検査結果	☒ 良好 ☐ 不良	トシ		
運転検査結果	☒ 良好 ☐ 不良	トシ								
特記事項										