



株式会社エムシーサービス  
機械事業本部 営業  
〒704-8122  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL 086-944-6528  
FAX 086-942-9030

# ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

|     |    |                   |         |                |           |
|-----|----|-------------------|---------|----------------|-----------|
| お客様 | 名称 | にし歯科医院            | 製造番号    | 100183         | ご確認<br>田中 |
|     | 住所 | 三重県伊勢市小俣町本町341-27 | 納入日     | 2017年 2月27日    |           |
|     |    |                   | 納入検査実施者 | エムシーサービス(株) 高津 |           |

| 項目    | 判定 | 検査項目                           | 項目    | 判定     | 検査項目                                                                  |    |
|-------|----|--------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認                         | 外装・設置 | ✓      | 本体の水平確認 ドアLOCK位置確認                                                    |    |
|       | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検                  |       | ✓      | アジャスタフットの緩み・設置状態                                                      |    |
|       | ✓  | ドアロックユニット動作確認                  |       | ✓      | キズ・汚れ                                                                 |    |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認                |       | ✓      | ドア開閉時装置設置位置がずれないこと                                                    |    |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態               | スペース  | ✓      | 装置設置スペースの確保<br>熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと                                   |    |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付                | 制御    | ✓      | 運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認                                      |    |
|       | ✓  | 洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ         |       | ✓      | タッチパネル表示確認・履歴の確認                                                      |    |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認                       |       | ✓      | ラック仕様切換(ハントピースラック・標準ラック)                                              |    |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認                   |       | 有・無    | 温水使用切換                                                                |    |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ               | 評価機能  | ✓      | インジケーターによる残渣判定(TOSI)                                                  |    |
|       | ✓  | 排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)  |       | ✓      | 周波数と設置ICWの一致                                                          |    |
|       | ✓  | お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水/湯逆配管NG)    |       | ✓      | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付                                                   |    |
|       | ✓  | 給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)      |       | ✓      | 運転・お手入れ方法の説明                                                          |    |
| 電装系   | ✓  | 給湯温度(45~50℃)                   | その他   | ✓      | 装置内運転時異音・振動                                                           |    |
|       | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ              |       |        |                                                                       |    |
|       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認                |       |        |                                                                       |    |
|       | ✓  | 電源スイッチの作動状態                    |       | 運転検査結果 | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 不良 | トシ |
|       | ✓  | SDカードの挿入・取外性                   |       |        |                                                                       |    |
|       | ✓  | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意) |       |        |                                                                       |    |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ             |       |        |                                                                       |    |
| 特記事項  |    |                                |       |        |                                                                       |    |
|       |    |                                |       |        |                                                                       |    |
|       |    |                                |       |        |                                                                       |    |
|       |    |                                |       |        |                                                                       |    |
|       |    |                                |       |        |                                                                       |    |