

小型 全自動洗濯消毒装置 WD-150点検表

お客様 氏名 住所 納入場所	依頼先 伝馬歯科 様	製品番号 FW 14090164	販売年度 2017年 8月 31日	作業印
	住所 石原市	通称 1F 22	点検実施者 工藤 裕文 (株) 野田 高洋	
	サービス内容 定期・保守・フルメンテ	その他 電子部品交換		

ドア確認

- 開閉動作確認
- ドアバッキン目視点検
- ドアフックの掛かり・締め付け確認
- ドア締め付けスイッチ作動確認
- インターロック動作確認
- テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ドアパネルの取付け状態・キズ
- ドアヒンジの動作
- ドア緊急時開放スイッチ動作確認
- ドア開放スイッチON時の開錠状態

洗濯ポンプ

- 洗剤レベルセンサー配線・配管取付
- 洗剤ホースの折れ・曲がり・巻き手の漏れ
- ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ローラーポンプの動作確認
- 容量計の検出状態
- 洗剤投入の確認
- 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取り付け状態
- 乾燥ファンの作動状態・異音
- 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- プレフィルターの汚れ
- メインフィルターの汚れ(MEPAフィルター)

配管系

- ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- 外部給水・給湯配管の絶平の検査・濡れ
- 外部排水配管(ホース)の取付け状態・漏れ
- 給水回路配管(ホース)の取付け状態・漏れ
- 排水回路配管(ホース)の取付け状態・漏れ
- 給湯水の作動状態・漏れ
- 給湯弁の作動状態・漏れ
- RO水の作動状態・漏れ
- 水位圧カススイッチ・センサーの取付け状態・漏れ
- 給水タンクの取付け状態・漏れ
- 排水タンクの取付け状態・漏れ
- 凝縮水の取付け状態・漏れ
- 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- 循環ポンプの取付け状態・漏れ
- 循環ポンプの作動状態・異音
- 防漏ゴムの取付け状態・劣化
- 排水ポンプの取付け状態・漏れ
- 排水ポンプの作動状態・異音

洗淨槽

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・剥れの有無
- 槽内LEDが客工程色で点灯している
- 洗淨アームの回転確認・ベアリング摩耗状態
- 洗淨アームの変形・損壊確認・つまり確認
- ラック接触ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- 加熱ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ヒーター通界防止線の取付け状態・汚れ

電気系


- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・ふれ・汚れ
- 各基板のコネクター端子確認
- 端子の緩み・コネクターの経路確認
- 配線の劣化・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・劣化有無(加温・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準線を内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 前面パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
- 消臭器
- ドアバッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- インジケータによる確認判定(TOST)

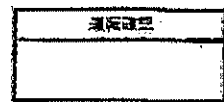

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合はのを付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
洗剤ポンプ	2
循環ポンプ	1
防漏ゴム	2
排水ポンプ 1P 4P	2
配管ジョイント	1

株式会社 HIEMATO
 機械部本部営業部 営業センター
 〒704-8722 岡山県岡山山手区東山町 70-6
 TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030

クラスB オートクレーブ BC-17点検表

お客様 印	名称	13/00058		点検実施日	2017年8月31日
	住所	名石屋市		点検場所	エムシーサービス(株)野田 高尾
	納入場所	2017回		実施者	野田 高尾
				受入担当者	

- 計装(安全)**
- 圧力計の点検済
 - ドア**
 - フック抽出スイッチの取り付け状態・動作確認
 - 両側ハンドル取り付け状態・動作確認
 - フック取付け状態・動作確認
 - フックパネ・フック調整ピンの取り付け状態
 - ピス・オット・ホーロー・セッパ埋し締め
 - ドアカバーの取り付け状態・封止
 - フック抽出ユニット動作確認
 - ドアロックユニット動作確認
 - 蓋板のキズ・汚れ

- 缶体**
- 錆れ・キズ・腐食・汚れの有無
 - 減圧感度センサの有無
 - 視力ゴの設置・汚れ
 - 缶内ストレーナーの有無・汚れ

- 配管系**
- フック駆動チェーン・継手の損傷・濡れ
 - シリンダチェーン・継手の損傷・濡れ
 - 給気弁の動作状態・濡れ
 - 排気弁の動作状態・濡れ
 - 真空・乾燥弁の動作状態・濡れ
 - 減圧弁の動作状態・濡れ(3万升)
 - ドレン弁の動作状態・濡れ(3万升)
 - ストレーナーの有無
 - 給水・給水タンク水抜きコネクタの濡れ・破損
 - 安全弁(減圧用)の有無
 - 安全弁(真空発生用)の有無
 - ダンプナーの有無・液液漏れ
 - 大気圧検知圧カススイッチの動作状態・濡れ
 - 予圧弁の取り付け状態・濡れ

- 真空発生器**
- ソケット接続確認・濡れ
 - フランジパッキン濡れ
 - ヒーター取り付け状態・濡れ
 - 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
 - 電圧ポンプの動作状態・真空・濡れ
 - 定電圧の作動状態・濡れ

- 真空ポンプ**
- 水濡れ・異常音の有無
 - 真空到達感

- 給水タンク**
- 給水タンクの損傷・濡れ
 - 下部給水弁の有無
 - 蓋・取っ手の損傷・封止
 - フロートスイッチの動作状態・濡れ

- 排水タンク**
- タンクの汚れ・濡れ
 - フロートスイッチの動作状態・濡れ

- 電気系**
- タッチパネルの稼働状態・キズ・汚れ
 - ディスプレイの色あせ・表示確認
 - 電源スイッチの作動状態
 - 行程戻り禁止の点灯
 - 真空コード・プラグのキズ・濡れ
 - 各装置のコネクター・漏れ確認
 - 給子の緩み・コネクターの損傷確認
 - 配線の色別・損傷有無・配線状態
 - 圧力センサーの取り付け状態・入力確認
 - ヒーター配線の緩み・異常有無(バイパー・封止)

- 外装・設置**
- 本体の水平確認・基準線有無
 - アジャスタフットの緩み・設置状態
 - キズ・汚れ
 - 側面パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

- 封鎖**
- 運転プログラムの確認
 - 入力・出力確認
 - 故障解除プログラムの実行・異常動作の有無

- 消耗品**
- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
 - エアフィルターのおまわり・濡れ

- 性能評価**
- 真空ロス試験
 - ケミカル・レジスターによる測定
 - リークチェック
 - キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

運転確認
✓

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社 IHIE
 機械事業本部営業部 営業サービス
 〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺3-10-6
 TEL 086-944-8528 FAX086-942-9030