

小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検表

お客様	名称	製造番号	点検実施日	11月器用	
	住所	運送時間	点検実施時間		
	納入場所	サービス形態	モリタ担当部署		
	エムシー歯科医院	14060089	2017.9.12		
	三郷 四時村 富田 2-12-13	1655	エムシーサービス(株) 富田		
		定期・保守・フルメンテ			

ドア機能

- 開閉動作確認
- ドアパッキン目視点検
- ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ドア締め付けスイッチ作動確認
- インターロック動作確認
- テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ドアパネルの取付け状態・キズ
- ドアヒンジの動作
- ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ
- ポンプチューブの潰れ・濡れ
- ローラーポンプの動作確認
- 流量計の検出状態
- 洗剤投入の確認
- 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取り付け状態
- 乾燥ファンの作動状態・異音
- 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- プレフィルターの汚れ
- メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷、濡れ
- 外部排水継ぎ手・ホースの濡れ
- 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・濡れ
- 給水弁の作動状態・濡れ
- 給湯弁の作動状態・濡れ
- RO水弁の作動状態・濡れ
- 水位圧カスリッパ・センサーの取り付け状態・濡れ
- 給水タンクの取り付け状態・濡れ
- 排水タンクの取り付け状態・濡れ
- 凝縮期の取り付け状態・濡れ
- 乾燥エア回路逆変弁の作動状態・濡れ

ポンプ

- 循環ポンプの取り付け状態・濡れ
- 循環ポンプの作動状態・異音
- 防護ゴムの取り付け状態・劣化
- 排水ポンプの取り付け状態・濡れ
- 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- 槽内LEDが各工程色で点灯している
- 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・濡れ
- 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の变色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・变色有無(加温・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
シールオイル	2
シールオイル パネル	2
洗剤 4-L	2
センターボリス	1

株式会社エムシーサービス
 機械事業本部営業部 営業センター
 〒704-8122 岡山県岡山市東区西大井町 70-6
 TEL 086-944-6528 FAX086-942-8030