



株式会社IHIシバツタ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地1-10-1

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030



クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

お客様	名称	にしい歯科クリニック 様	製造番号	100226 号機	ご確認 モイ 田中
	住所	三重県伊勢市小俣町本町341-237	納入検査実施日	2017.03.29	
	TEL	0596-72-8800	納入検査実施者	ISM 宮下, 中村	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚、トレーのキズ・汚れ		✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない 蓋の取付取外しに問題が無い		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
排水タンク	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	✓	B&Dテスト実施 デジタルモード運転実施
	✓	タンク内に汚れはないか		✓	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
スペース	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	その他	✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		✓	運転・お手入れ方法の説明
				✓	装置内運転時異音

特記事項

BMS-Test

STEAM

、天面クソアランス不足 ※パンチング有、排気可。