



株式会社IHインバウ  
機械事業本部 営業  
〒704-8122  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL 086-944-6528  
FAX 086-942-9030



# ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHインバウ用

|     |    |                 |         |                    |     |    |
|-----|----|-----------------|---------|--------------------|-----|----|
| お客様 | 名称 | 水谷歯科医院          | 製造番号    | 100255             | ご確認 | 田中 |
|     | 住所 | 三重県四日市市小杉町305-1 | 納入日     | 2017.10.5          |     |    |
|     |    |                 | 納入検査実施者 | エムシーサービス(株) 名古屋 野田 |     |    |

| 項目    | 判定 | 検査項目                               | 項目             | 判定                                                                                       | 検査項目                                |                      |
|-------|----|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認                             | 外装・設置          | ✓                                                                                        | 本体の水平確認 ドアLOCK位置確認                  |                      |
|       | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検                      |                | ✓                                                                                        | アジャスタフットの緩み・設置状態                    |                      |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認                      |                | ✓                                                                                        | キズ・汚れ                               |                      |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認                    |                | ✓                                                                                        | ドア開閉時装置設置位置がずれないこと                  |                      |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態                   | スペース           | ✓                                                                                        | 装置設置スペースの確保<br>熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと |                      |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付                    | 制御             | ✓                                                                                        | 運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認    |                      |
|       | ✓  | 洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ             |                | ✓                                                                                        | タッチパネル表示確認・履歴の確認                    |                      |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認                           |                | 有                                                                                        | ラック仕様切換(ハントピースラック・標準ラック)            |                      |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認                       |                | 無(有)                                                                                     | 温水使用切換                              |                      |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ                   |                | 評価<br>価能                                                                                 | ✓                                   | インジケーターによる残渣判定(TOSI) |
|       | ✓  | 排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)      | ✓              |                                                                                          | 周波数と設置ICWの一致                        |                      |
|       | ✓  | お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)        | ✓              |                                                                                          | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付                 |                      |
|       | ✓  | 給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)          | ✓              |                                                                                          | 運転・お手入れ方法の説明                        |                      |
|       | ✓  | 給湯温度(45～50℃)                       | ✓              |                                                                                          | 装置内運転時異音・振動                         |                      |
| 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ                  | 運転<br>検査<br>結果 | <div><input checked="" type="checkbox"/> 良好</div> <div><input type="checkbox"/> 不良</div> |                                     | トシ                   |
|       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認                    |                |                                                                                          |                                     |                      |
|       | ✓  | 電源スイッチの作動状態                        |                |                                                                                          |                                     |                      |
|       | ✓  | SDカードの挿入・取外性                       |                |                                                                                          |                                     |                      |
|       | ✓  | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと<br>(漏電・熱注意) |                |                                                                                          |                                     |                      |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ                 |                |                                                                                          |                                     |                      |

特記事項