

IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作事書用
111アグリテック用

お客様	名称	タニワナ 歯科医院	製造番号	14070121	点検実施日	2019.10.27	ご承認印	印
	住所	三郷市阿見町神明 2130-1	運転回数	3209	点検実施者	エンジニア(株) 名古屋 野田		
	納入場所		サービス形態		モリタ担当部署			

計装(安全)

圧力計0点指示誤差

ドア

- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取り付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパナ・フック緩番ピンの取り付け状態
- ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

每株

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 減圧温度センサの汚れ
- ☒ 綱カゴの緩横、汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ✓ フッ素樹脂チューブ・魁手の損傷、漏れ
- ✓ シリコンチューブ・魁手の損傷、漏れ
- ✓ 給気弁の作動状態・漏れ
- ✓ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ✓ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ✓ 減圧弁の作動状態・漏れ(3万弁)
- ✓ ドレン弁の作動状態・漏れ(3万弁)
- ✓ ストレーナーの汚れ
- ✓ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ、破損
- ✓ 安全弁(減圧室)の漏れ
- ✓ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ✓ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ✓ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ✓ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸氣發生器

- ☒ ソケット他接続割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆止弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

☒ 水漏れ・異常音の確認
☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部貯水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

☒ タンクの汚れ・漏れ
☒ フLOATスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外観・設置

☒	本体の水平確認・基準傾き内
☒	アジャスタフットの緩み・設置状態
☒	キズ・汚れ
☐	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制衡

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消费品

☒ ドアバッキングの損傷・劣化・汚れ
☒ エアフィルターのおまわり、汚れ

性能評價

- ☒ B & Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケーターによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

【 附 註 】

運送確認

否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品（名称・型式）	数量

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

千704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX: 086-942-9030