

クラスB オートクレープ BC-17点検表

お客様	名前 吹上井戸歯科様 在所 名古屋市昭和区昭和町2-1-1 納入場所	開通番号 14090172 点検時間 1926 サービス形態	直接実施日 2017.5.19 直接実施者 エムシーサービス(株)名古屋 モリタ担当部署	印
-----	--	--	--	---

計装(安全)

- 圧力計の点検表示装置
- ドア
- フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- 開閉ハンドル取付付状態・動作確認
- フック取付付状態・動作確認
- フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ピス・ナット・ホーロー・ヒートシールド
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック検出ユニット作動確認
- ドアロッキングユニット作動確認
- 遷移のキズ・汚れ

缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 温度センサの割れ
- 真空弁の破損・汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- フジツボ用チューブ・端子の損傷・漏れ
- シリコンチューブ・端子の損傷・漏れ
- 空気弁の作動状態・漏れ
- 排氣弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- 送風弁の作動状態・漏れ(3万弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3万弁)
- ストレーナーの漏れ
- 漂水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(減圧弁)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット地滑り割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 爆発防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆止弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度 -89.6 kPa

給水タンク

- 油水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 漂・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・漏れ

排水タンク

- タンクの漏れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・漏れ

電気系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・上り・汚れ
- 各基板のコネクター組み直し
- 埋子の組み・コネクターの接続確認
- 記録の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付付状態・入力確認
- ヒーター記録の纏み・変色有無(ボイラ→乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスター足の組み・設置状態
- ホズ・汚れ
- 振舞パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパンキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- 日常テスト実施
- ケヨカルインジケーターによる判定
- リークチェック
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

運動確認	
<input checked="" type="checkbox"/>	

交換部品(名称・型式)

数量

ドアパッキン	/



機械事業本部営業部 営業サービス

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺町70-6

TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030